

Датум: 12 Мај 2025 година

Известување за безбедност на терен
TufTex® Катетер за емболектomiја преку жица
Pruitt® катетер за окулзија
Pruitt® катетер за иригација и оклузија

За внимание на здравствените работници

Податоци за контакт на увозникот

ФИЛА ФАРМ ДООЕЛ – Скопје
ул. Бледски договор бр. 8
1000 Скопје
Р. Северна Македонија



Известување за безбедност на терен
TufTex® Катетер за емболектомија преку жица
Pruitt® катетер за окулзија
Pruitt® катетер за иригација и оклузија

1. Податоци за засегнатите медицински средства

1.1. Тип на медицински средства	Катетер за емболектомија, катетер за окулзија.
1.2. Заштитени имиња:	TufTex® Катетер за емболектомија преку жица, Pruitt® Катетер за окулзија, Pruitt® Катетер за иригација и оклузија
1.3. Единствени броеви за идентификација на медицинските средства (UDI-DI):	1651-34: 00840663100651 1651-38: 00840663100668 1651-44: 00840663100675 1651-48: 00840663100682 1651-64: 00840663100712 1651-68: 00840663100729 1651-78: 00840663100736 1651-84: 00840663100743 1651-88: 00840663100750 2103-36: 00840663101559 2103-46: 00840663101566 2103-56: 00840663101573 2102-09: 00840663101535
1.4. Примарна клиничка намена на медицинските средства:	TufTex® Катетер за емболектомија преку жица: индициран за користење при отстранување на емболуси и тромби при емболектомија и/или тромболектомија. Може да се користи и за ставање катетер преку жица водилка, за окулзија на крвни садови, за инфузија и/или аспирација на течности. Pruitt® Катетер за окулзија: индициран за окулзија на крвни садови, како артериски така и венски, за контрола на крварење. Pruitt® Катетер за иригација и оклузија: индициран за привремено затворање на крвни садови заради контрола на крвање. За пристап до луменот на крвниот сад дистално од точката на оклузија.
1.5. Модел на медицинското средство/Каталожки број / Број на дел:	TufTex® Катетер за емболектомија преку жица: 1651-34, 1651-38, 1651-44, 1651-48, 1651-64, 1651-68, 1651-78, 1651-84, 1651-88 Pruitt® Катетер за окулзија: 2103-36, 2103-46, 2103-56, Pruitt® Катетер за иригација и оклузија: 2102-09



FSN / FSCA Ref: CAPA 2025-007

1.6. Засегнати сериски броеви или броеви на лот:	Видете го приложениот документ со списокот на засегнати лотови Потенцијално засегнатите броеви на лотови се утврдени преку ревидирање на максималниот рок на употреба за секоја производна линија. TufTex® Катетер за емболектомија преку жица (6 години рок на употреба) – дистрибуирани од април 2019 до април 2025 година Pruitt® Катетер за окулзија (7 години рок на употреба) – дистрибуирани од јули 2018 до април 2025 година Pruitt® Катетер за иригација и оклузија (5 години рок на употреба) Дистрибуиран од септември 2020 до април 2025 година
2. Причина за безбедносна корективна мерка на терен (FSCA)	
2.1. Опис на проблемот со медицинското средство:	Кај примероци од овие три производни линии биле пронајдени несоодветно залепување на филм фолијата
2.2. Ризик поради кој се покренува безбедносната корективна мерка:	Потенцијален ризик од инфекција ако е прекината безбедносната бариера на пакувањето на медицинското средство.
2.3. Веројатност за појава на проблем:	Не се добиени поплаки за овој проблем. По инспекцијата и тестирањето на завршените примероци на производи, резултатите укажуваат дека е можно пакувањето да е оштетено само кај приближно околу 1% од медицинските средства.
2.4. Предвиден ризик за пациентите/корисниците:	Потенцијалниот ризик за пациентот е инфекција ако е нарушена стерилната бариера на пакувањето. Само пациентите што се подложени на интервенција со користење на TufTex® Катетери за емболектомија преку жица, Pruitt® Катетер за окулзија, или Pruitt® Катетер за иригација и оклузија се во ризик.
2.5. Дополнителни информации кои ќе помогнат да се идентификува проблемот	Нема
2.6. Податоци за проблемот:	Проблемот со несоодветното лепење на филм фолијата на пакувањето е забележан при неповрзан тест на TufTex® OTW катетери. Тогаш инженерите за квалитет и за производство направиле преглед и потврдиле дека некои делови (околу 10% од секоја дадена серија) би можеле да имаат пропусти во лепењето филм фолијата на местото каде што цевката се поврзува со контейнерот. Пропустите биле забележани визуелно на светлина и биле потврдени по отворањето на капакот на Тувек. Тестирањето на интегритетот на лепењето (пенетрација на боја) на други примероци со визуелно откриени пропусти потврдиле дека има недостатоци кај некои од примероците што укажува на оштетени пакувања (1%), што може да пропусти микроорганизми да влезат и да го контаминираат медицинското средство што може да доведе до потенцијална инфекција што би се пренела преку оштетеното медицинско средство.



FSN / FSCA Ref: CAPA 2025-007

3.1. Постапки што треба да ги преземе корисникот:	☒ Идентификација на средството ☒ Ставање на средството во карантин ☒ Враќање на средството ☐ Уништување на средството ☐ Модифицирање/инспекција на средството на лице место ☐ Следење на препораките за работа со пациентите ☐ Разгледување на дополнувањата/појаснувањата на упатството за употреба (IFU) ☐ Друго ☐ Ништо
3.2. До кога треба да бидат спроведени постапките (од страна на корисникот)?	Ставете го производот во карантин. Пополнете го Што е можно побрзо.
3.3. Особено треба да се води сметка за:	Дали се препорачуваат следење на пациентите или преглед на претходните резултати на пациентите? ☐ Да ☒ Не
3.4. Дали се бара одговор од клиентот?	Не се потребни дополнителни активности. ☒ Да ☐ Не
3.5. Постапки што ги презема производителот:	☒ Отстранување на медицинското средство ☐ Модифицирање/инспекција на медицинското средство на лице место ☐ Надградба на софтвер ☐ Промена на упатството или на означувањето ☐ Друго ☐ Ништо
3.6. До кога треба да се спроведат постапките (од страна на производителот)?	30 октомври 2025 година
4. Општи информации	
4.1. Вид на FSN:	Нова
4.2. Понатамошни совети или информации што се очекуваат во следната безбедносна корективна мерка (FSN)?	☐ Да ☐ Не ☒ Сè уште не се планирани



4.3. Информации за производителот:	(Податоците за контакт на локалниот претставник се дадени на страницата 1 од оваа безбедносна корективна мерка) Име на производителот: LeMaitre Vascular, Inc. Адреса: 63 Second Ave. Burlington, MA 01803 USA
4.4. Надлежниот (регулаторен) орган на вашата земја е известен за ова безбедносна корективна мерка.	
4.5. Име/потпис	Александра Димитровска Одговорно лице за материовигиланца

5. Пренесување на ова известување за безбедносна корективна мерка на терен

Ова известување треба да се достави до сите оние што треба да бидат запознаени во рамките на вашата здравствена установа или во било која установа каде може да се дистрибуирани потенцијално засегнатите медицински средства,

Ве молиме да да го доставите ова известување до другите установи на кои може да влијае оваа безбедносна корективна мерка.

Ве молиме да го имате во предвид ова известување и постапките што произлегуваат од него во соодветен временски период за да се обезбеди ефективност на корективните активности.

Ве молиме да ги пријавите сите инциденти поврзани со медицинските средства кај локалниот претставник ФИЛА ФАРМ ДООЕЛ – Скопје кај Александра Димитровска, одговорно лице за материовигиланца на тел.078/316632 и е-пошта: aleksandra.dimitrovska@filafarm.com.mk или до Агенцијата за лекови и медицински средства (ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 кат 1) или по електронски пат преку веб-страницата на агенцијата <http://malmed.gov.mk/>



FSN / FSCA Ref: CAPA 2025-007

**Формулар за одговор на
корисникот**

Датум на белешката:

Ве молиме да го пополните овој формулар за одговор и да ни го испратите по е- пошта:
aleksandra.dimitrovska@filafarm.com.mk

Формуларот мора да се врати дури и ако немате медицински средства на залиха.

Број на сметка	Име на корисникот	Адреса
25016	ФИЛА-ФАРМ ДООЕЛ	ул. Бледски договор бр. 8 1000 Скопје Р. Северна Македонија

Ако не сте корисникот кој е наведен во табелата, ве молиме подолу да ги наведете податоците за
вашиата установа.

Име на лицето за контакт
(Име и презиме)

Е-пошта за контакт

Телефон за контакт

Потпис и датум

Дали поседувате некои од повлечените медицински средства?

☐ Да

☐ Не

Ако одговорот е да, Ве молиме да ја пополните подолната табела.

- Ако сте ја провериле залихата и немате од повлечените медицински средства, може
едноставно да испратите е-пошта на aleksandra.dimitrovska@filafarm.com.mk и да назначите
дека „Ја проверивме нашата залиха во **25016**, на _____ и
немаме ниту еден од повлечените медицински средства.“

РЕФЕРЕНТЕН Бр.	Бр. на СЕРИЈА	КОЛИЧИНА НА ЗАЛИХА



Страница 6 од 8

LeMaitre Vascular GmbH, регистрирана во окружниот суд во Франкфурт на Мајна, НРБ бр. 77241
Генерален директор: Џорџ В. Лематр, Мат Хелмерс – ДДВ бр.: DE812338392, USt-Nr.: 4323816017

АДРЕСА НА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ИСПРАТАТ МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА ЗА ЗАМЕНА:

Дистрибутери:

- ☐ Ги проверив мојите залихи и ставив во карантин _____ медицински средства.
- ☐ Ги идентификував и ги известив сите мои клиенти што се засегнати со ова повлекување.
- ☐ Ако медицинските средства се дистрибуирани надвор од САД, за ова повлекување ја известив регулаторна агенција за медицински средства во земјата.
- ☐ Не ја известив регулаторна агенција за медицински средства, причините се наведени подолу.

Причини:

Име/функција

Телефон



Е-пошта

Ако имате дистрибуирано медицински средства во друга установа, Ве молиме да им испратите копија од ова известување за повлекување.

Ако е можно, наведете ги податоците за установата, вклучувајќи ги и податоците за контакт. Исто така, Ве молиме да ставите забелешка ако повторно сте ги добиле медицинските средства од друга установа.

Ви благодариме за соработката!



Медицинско средство	Каталошки број	Лот број
TufTex Катетер за емболектомија Преку жица	1651-34	OTW4170, OTW4172, OTW4234, OTW4217, OTW4213, OTW4171, OTW4308, OTW4209, OTW4375, OTW4383, OTW4416, OTW4570, OTW4448, OTW4434, OTW4595, OTW4626, OTW4712, OTW4725, OTW4713, OTW4788, OTW4787, QOT1082, OTW4794, QOT1083, QOT1132, QOT1264, QOT1239, OTW4814, QOT1265, QOT1282, QOT1240, QOT1283, OTW4823, OTW4825, QOT1286, OTW4835, OTW4849, XOT0057, XOT0024, OTW4857, OTW4870, OTW4876, XOT1025, XOT0025, OTW1265, OTW4877, XOT1060, OTW4878, XOT1061, OTW4888, XOT1148, XOT1113, OTW4894, XOT1281, XOT1282, OTW4897, XOT1159, XOT1229, XOT1404, XOT1338, OTW4900, XOT1405, XOT1337, OTW4914, XOT1521, XOT1429, OTW4915, XOT00001626, XOT1462, XOT1461, XSL1461, XSL1429, XOT1509, OTW4916, XOT1522, XOT00001756, XOT00001742, OTW00004956, XOT00001743, XOT00001649, OTW00004971, XOT00001868, XOT00001870, OTW00004975, OTW00004977
	1651-38	OTW00004972, OTW00004978, OTW4173, OTW4185, OTW4186, OTW4199, OTW4250, OTW4251, OTW4278, OTW4279, OTW4310, OTW4312, OTW4321, OTW4329, OTW4330, OTW4350, OTW4355, OTW4373, OTW4374, OTW4382, OTW4384, OTW4394, OTW4413, OTW4414, OTW4415, OTW4419, OTW4420, OTW4435, OTW4449, OTW4451, OTW4571, OTW4594, OTW4600, OTW4601, OTW4606, OTW4632, OTW4633, OTW4654, OTW4655, OTW4657, OTW4659, OTW4661, OTW4731, OTW4778, OTW4785, OTW4786, OTW4811, OTW4812, OTW4813, OTW4822, OTW4826, OTW4831, OTW4838, OTW4850, OTW4858, OTW4861, OTW4872, OTW4881, OTW4887, OTW4889, OTW4892, OTW4895, OTW4896, OTW4898, OTW4899, OTW4901, OTW4902, OTW4903, OTW4904, OTW4905, OTW4906, OTW4907, OTW4908, OTW4910, OTW4911, QOT1037, QOT1065, QOT1070, QOT1071, QOT1072, QOT1073, QOT1078, QOT1084, QOT1125, QOT1126, QOT1127, QOT1130, QOT1140, QOT1141, QOT1164, QOT1165, QOT1174, QOT1175, QOT1189, QOT1190, QOT1191, QOT1192, QOT1202, QOT1203, QOT1204, QOT1205, QOT1217, QOT1218, QOT1219, QOT1230, QOT1231, QOT1232, QOT1273, QOT1274, QOT1275, QOT1294, QOT1295, QOT1352, QOT1353, QOT1354, QOT1359, QOT1360, QOT1377, QOT1439, XOT00001658, XOT00001666, XOT00001734, XOT00001735, XOT00001736, XOT00001748, XOT00001749, XOT00001752, XOT00001753, XOT00001842, XOT00001843, XOT00001844, XOT00001917, XOT00001918, XOT00001959, XOT00001960, XOT00001977, XOT0026, XOT0027, XOT0028, XOT0032, XOT0039, XOT0040, XOT0046, XOT0047, XOT0060, XOT0061, XOT0068, XOT0069, XOT0075, XOT0076, XOT1001, XOT1002, XOT1003, XOT1020, XOT1021, XOT1022, XOT1041, XOT1042, XOT1043, XOT1044, XOT1168, XOT1169, XOT1185, XOT1186, XOT1187, XOT1213, XOT1214, XOT1215, XOT1216, XOT1217, XOT1222, XOT1223, XOT1236, XOT1265, XOT1266, XOT1267, XOT1268, XOT1283, XOT1284, XOT1325, XOT1326, XOT1327, XOT1328, XOT1364, XOT1367, XOT1368, XOT1369, XOT1383, XOT1384, XOT1385, XOT1386, XOT1410, XOT1493, XOT1494, XOT1495, XOT1496, XOT1510, XOT1511, XOT1512, XOT1513, XOT1524, XOT1525, XOT1526, XOT1537, XOT1538, XOT1539, XOT1540, XOT1561, XOT1562, XOT1563



Медицинско средство	Каталошки број	Лот број
	1651-44	OTW4200, OTW4205, OTW4215, OTW4235, OTW4299, OTW4307, OTW4331, OTW4356, OTW4385, OTW4412, OTW4495, OTW4514, OTW4520, OTW4530, OTW4569, OTW4593, OTW4714, OTW4738, OTW4783, OTW4784, OTW4801, OTW4802, OTW4805, OTW4806, OTW4817, OTW4818, OTW4821, OTW4827, OTW4832, OTW4833, OTW4840, OTW4847, OTW4863, QOT1058, QOT1060, QOT1074, QOT1124, QOT1131, QOT1166, QOT1200, QOT1201, QOT1216, QOT1229, QOT1236, QOT1262, QOT1491, XOT00001610, XOT00001627, XOT00001711, XOT00001740, XOT00001840, XOT0048, XOT0049, XOT1058, XOT1059, XOT1094, XOT1095, XOT1114, XOT1115, XOT1230, XOT1269, XOT1270, XOT1287, XOT1574
	1651-48	OTW4103, OTW4174, OTW4175, OTW4203, OTW4204, OTW4223, OTW4226, OTW4236, OTW4252, OTW4253, OTW4290, OTW4298, OTW4306, OTW4322, OTW4323, OTW4332, OTW4351, OTW4357, OTW4361, OTW4372, OTW4393, OTW4409, OTW4410, OTW4411, OTW4421, OTW4422, OTW4468, OTW4494, OTW4499, OTW4500, OTW4501, OTW4503, OTW4504A, OTW4505, OTW4629, OTW4634, OTW4635, OTW4662, OTW4663, OTW4681, OTW4682, OTW4690, OTW4702, OTW4703, OTW4705, OTW4707, OTW4708, OTW4709, OTW4754, OTW4779, OTW4780, OTW4781, OTW4782, OTW4800, OTW4807, OTW4808, OTW4828, OTW4834, OTW4841, OTW4851, OTW4860, OTW4864, QOT1041, QOT1042, QOT1043, QOT1054, QOT1055, QOT1063, QOT1064, QOT1091, QOT1092, QOT1093, QOT1102, QOT1103, QOT1153, QOT1154, QOT1155, QOT1185, QOT1186, QOT1187, QOT1188, QOT1213, QOT1214, QOT1215, QOT1227, QOT1228, QOT1241, QOT1242, QOT1260, QOT1261, QOT1270, QOT1271, QOT1272, QOT1280, QOT1312, QOT1313, QOT1314, QOT1315, QOT1349, QOT1350, QOT1351, QOT1380, QOT1381, QOT1382, QOT1410, QOT1411, QOT1412, QOT1416, QOT1417, QOT1418, QOT1426, QOT1427, XOT00001611, XOT00001612, XOT00001619, XOT00001620, XOT00001621, XOT00001628, XOT00001629, XOT00001630, XOT00001631, XOT00001641, XOT00001642, XOT00001643, XOT00001659, XOT00001668, XOT00001669, XOT00001682, XOT00001687, XOT00001688, XOT00001689, XOT00001695, XOT00001696, XOT00001697, XOT00001726, XOT00001727, XOT00001923, XOT0041, XOT0042, XOT0050, XOT0051, XOT0062, XOT0063, XOT0070, XOT0071, XOT0077, XOT0078, XOT0079, XOT0080, XOT1028, XOT1029, XOT1030, XOT1031, XOT1032, XOT1033, XOT1081, XOT1082, XOT1091, XOT1092, XOT1093, XOT1096, XOT1097, XOT1098, XOT1116, XOT1117, XOT1118, XOT1119, XOT1233, XOT1234, XOT1235, XOT1249, XOT1250, XOT1271, XOT1272, XOT1273, XOT1274, XOT1285, XOT1286, XOT1321, XOT1322, XOT1323, XOT1324, XOT1358, XOT1359, XOT1360, XOT1361, XOT1365, XOT1381, XOT1409, XOT1412, XOT1413, XOT1415, XOT1430, XOT1431, XOT1432, XOT1433, XOT1464, XOT1465, XOT1466, XOT1467, XOT1468, XOT1497, XOT1498, XOT1499, XOT1500
	1651-64	OTW4178, OTW4206, OTW4210, OTW4237, OTW4282, OTW4403, OTW4404, OTW4427, OTW4438, OTW4673, OTW4819, OTW4824, QOT1056, QOT1059, QOT1085, QOT1129, QOT1156, QOT1226, QOT1269, QOT1281, QOT1385, QOT1387, QOT1397, QOT1419, XOT00001675, XOT00001712, XOT00001762, XOT0043, XOT1026, XOT1083, XOT1158, XOT1175, XOT1176, XOT1297, XOT1379, XOT1400, XOT1555



Медицинско средство	Каталожки број	Лот број
	1651-68	OTW00004950, OTW00004953, OTW4207, OTW4214, OTW4216, OTW4224, OTW4225, OTW4227, OTW4264, OTW4297, OTW4342, OTW4343, OTW4352, OTW4353, OTW4370, OTW4371, OTW4386, OTW4402, OTW4426, OTW4455, OTW4460, OTW4466, OTW4467, OTW4521, OTW4531, OTW4532, OTW4540A, OTW4541A, OTW4542A, OTW4543, OTW4552, OTW4553, OTW4554, OTW4567, OTW4568, OTW4589, OTW4590, OTW4591, OTW4592, OTW4607, OTW4608, OTW4610, OTW4611, OTW4612, OTW4630, OTW4836, OTW4859, OTW4873, OTW4912, QOT1038, QOT1039, QOT1075, QOT1077, QOT1086, QOT1099, QOT1100, QOT1113, QOT1114, QOT1115, QOT1348, QOT1362, QOT1363, QOT1398, QOT1420, QOT1421, QOT1428, XOT00001613, XOT00001614, XOT00001632, XOT00001633, XOT00001741, XOT00001755, XOT00001865, XOT00001866, XOT00001867, XOT00001879, XOT00001880, XOT00001891, XOT00001992, XOT00001994, XOT0044, XOT0072, XOT0073, XOT1011, XOT1055, XOT1062, XOT1137, XOT1143, XOT1144, XOT1145, XOT1171, XOT1172, XOT1251, XOT1275, XOT1288, XOT1293, XOT1294, XOT1306, XOT1339, XOT1341, XOT1342, XOT1380, XOT1401, XOT1402, XOT1420, XOT1434, XOT1469, XOT1470, XOT1471, XOT1472, XOT1541, XOT1542, XOT1545, XOT1546, XOT1547
	1651-78	OTW00004951, OTW4228, OTW4245, OTW4262, OTW4265, OTW4280, OTW4281, OTW4344, OTW4345, OTW4401, OTW4408, OTW4423, OTW4424, OTW4425, OTW4450, OTW4636, OTW4637, OTW4653, OTW4656, OTW4660, OTW4774A, OTW4776A, OTW4797, OTW4909, QOT1057, QOT1090, QOT1104, QOT1142, QOT1143, QOT1144, QOT1157, QOT1158, QOT1167, QOT1168, QOT1180, QOT1198, QOT1199, QOT1235, QOT1249, QOT1341, QOT1346, QOT1429, XOT00001872, XOT00001882, XOT00001713, XOT00001759, XOT00001760, XOT00001761, XOT00001775, XOT00001776, XOT00001872, XOT00001882, XOT00001900, XOT00001901, XOT00001928, XOT00001929, XOT00001940, XOT00001965, XOT00001972, XOT0045, XOT1023, XOT1024, XOT1047, XOT1048, XOT1084, XOT1138, XOT1173, XOT1174, XOT1179, XOT1252, XOT1289, XOT1295, XOT1307, XOT1329, XOT1330, XOT1343, XOT1344, XOT1345, XOT1346, XOT1387, XOT1388, XOT1390, XOT1423, XOT1424, XOT1425
	1651-84	OTW4201, OTW4202, OTW4238, OTW4239, OTW4246, OTW4392, OTW4436, OTW4444, OTW4445, OTW4456, OTW4471, OTW4472, OTW4473, OTW4474, OTW4475, OTW4506, OTW4507, OTW4508, OTW4517, OTW4522A, OTW4523, OTW4524, OTW4525, OTW4544, OTW4545, OTW4546, OTW4547, OTW4585, OTW4586, OTW4587, OTW4588, OTW4602, OTW4603, OTW4609, OTW4631, OTW4645, OTW4646, OTW4647, OTW4648, OTW4649, OTW4650, OTW4820, OTW4829, OTW4852, OTW4854, QOT1029, QOT1067, QOT1068, QOT1110, QOT1146, QOT1147, QOT1258, QOT1259, QOT1291, QOT1292, QOT1293, QOT1301, QOT1302, QOT1303, QOT1323, QOT1324, QOT1329, QOT1330, QOT1331, QOT1332, QOT1336, QOT1355, QOT1370, QOT1372, QOT1373, QOT1384, QOT1389, QOT1390, QOT1391, QOT1392, QOT1433, QOT1434, QOT1435, QOT1445, QOT1446, QOT1447, QOT1453, QOT1454, QOT1455, QOT1456, QOT1475, QOT1476, QOT1500, QOT1501, QOT1502, QOT1505, XOT00001716, XOT00001717, XOT00001718, XOT00001719, XOT00001769, XOT00001770, XOT00001852, XOT00001853, XOT00001854, XOT00001890A, XOT00001902, XOT00001903, XOT00001945, XOT00001946, XOT00001947, XOT00001957, XOT00002075, XOT1050A, XOT1077, XOT1078, XOT1079, XOT1080, XOT1103, XOT1106



Медицинско средство	Каталошки број	Лот број
	1651-88	OTW4180, OTW4187, OTW4188, OTW4197, OTW4198, OTW4218, OTW4220, OTW4220A, OTW4221, OTW4229, OTW4230, OTW4254, OTW4255, OTW4294, OTW4391, OTW4399, OTW4400, OTW4417, OTW4431, OTW4437, OTW4439, OTW4453, OTW4454, OTW4457, OTW4458, OTW4461, OTW4462, OTW4463, OTW4476, OTW4477, OTW4478, OTW4480, OTW4496, OTW4498, OTW4509, OTW4511, OTW4512, OTW4513, OTW4519, OTW4526, OTW4527, OTW4528, OTW4529A, OTW4548, OTW4549A, OTW4550A, OTW4551A, OTW4556A, OTW4557, OTW4558, OTW4559, OTW4560, OTW4561, OTW4562, OTW4563, OTW4564, OTW4565, OTW4566, OTW4572, OTW4573, OTW4574, OTW4575, OTW4597, OTW4598, OTW4599, OTW4613, OTW4614, OTW4615, OTW4616, OTW4617, OTW4638, OTW4639, OTW4640, OTW4641, OTW4642, OTW4643, OTW4664, OTW4665, OTW4666, OTW4667, OTW4668, OTW4669, OTW4684, OTW4685, OTW4686, OTW4687, OTW4688, OTW4689, OTW4696, OTW4697, OTW4699, OTW4716, OTW4789, OTW4816, OTW4830, OTW4848, OTW4853, OTW4855, OTW4868, QOT1028, QOT1034, QOT1044, QOT1045, QOT1046, QOT1047, QOT1048, QOT1049, QOT1080, QOT1094, QOT1096, QOT1097, QOT1098, QOT1105, QOT1121, QOT1122, QOT1123, QOT1159, QOT1160, QOT1161, QOT1181, QOT1182, QOT1183, QOT1184, QOT1194, QOT1195, QOT1196, QOT1197, QOT1222, QOT1304, QOT1305, QOT1306, QOT1307, QOT1318, QOT1319, QOT1320, QOT1321, QOT1322, QOT1342, QOT1343, QOT1344, QOT1345, QOT1400, QOT1401, QOT1402, QOT1403, QOT1404, QOT1409, QOT1436, QOT1437, QOT1438, QOT1442, QOT1450, QOT1451, QOT1452, QOT1464, QOT1465, QOT1466, QOT1470, QOT1471, QOT1472, QOT1474, QOT1477, QOT1481, QOT1482, QOT1503, QOT1504, XOT00001601, XOT00001602, XOT00001603, XOT00001622, XOT00001623, XOT00001639, XOT00001640, XOT00001654, XOT00001656, XOT00001657, XOT00001660, XOT00001699, XOT00001700, XOT00001701, XOT00001702, XOT00001703, XOT00001704, XOT00001705, XOT00001730, XOT00001731, XOT00001732, XOT00001733, XOT00001745, XOT00001746, XOT00001747, XOT00001771, XOT00001772, XOT00001779, XOT00001860, XOT00001861, XOT00001906, XOT00001907, XOT00001908, XOT00001951, XOT00002012, XOT00002013, XOT00002014, XOT00002015, XOT00002016, XOT00002017, XOT00002018, XOT00002022, XOT00002023, XOT00002028, XOT00002029, XOT00002030, XOT00002071, XOT00002072, XOT00002073, XOT00002074, XOT00002086, XOT00002087, XOT00002088, XOT00002089, XOT00002094, XOT00002119, XOT00002120, XOT00002131, XOT00002141, XOT0058, XOT1005, XOT1009, XOT1010, XOT1012, XOT1016, XOT1019, XOT1034, XOT1035, XOT1036, XOT1037, XOT1038, XOT1046, XOT1053A, XOT1054A, XOT1070, XOT1071, XOT1072, XOT1074, XOT1075, XOT1090, XOT1107, XOT1108, XOT1109, XOT1140, XOT1141, XOT1142, XOT1160, XOT1161, XOT1182, XOT1183, XOT1218, XOT1219, XOT1221, XOT1241, XOT1253, XOT1254, XOT1255, XOT1256, XOT1264, XOT1301, XOT1302, XOT1303, XOT1317, XOT1318, XOT1319, XOT1320, XOT1331, XOT1332, XOT1352, XOT1354, XOT1355, XOT1362, XOT1363, XOT1377, XOT1378, XOT1382, XOT1396, XOT1446, XOT1453, XOT1454, XOT1504, XOT1516, XOT1517, XOT1519, XOT1523, XOT1529, XOT1530, XOT1534, XOT1535, XOT1536, XOT1548, XOT1549, XOT1550, XOT1566, XOT1567, XOT1568, XOT1569, XOT1571, XOT1572, XOT1573



Медицинско средство	Каталожки број	Лот број
Pruitt Катетер за оклузија	2103-36	POC00002053, POC1833, POC1834, POC1838, POC1841, POC1845, POC1848, POC1852, POC1853, POC1861, POC1862, POC1866, POC1872, POC1875, POC1877, POC1880, POC1883, POC1884, POC1886, POC1887, POC1894, POC1896, POC1900, POC1903, POC1911, POC1916, POC1917, POC1918, POC1919, POC1930, POC1948, POC1950, POC1952, POC1953, POC1957, POC1961, POC1963, POC1965, POC1966, POC1967, POC1970, POC1971, POC1982, POC1984, POC1985, POC2000, POC2003, POC2005, POC2006, POC2011, POC2012, POC2017, POC2018, POC2020, POC2022, POC2023, POC2026, POC2027, POC2028, POC2034, POC2036, POC2037, QPO1011, QPO1016, QPO1018, QPO1024, QPO1027, QPO1030, QPO1031, QPO1034, QPO1035, QPO1036, QPO1043, QPO1045, QPO1048, QPO1054, QPO1058, QPO1061, QPO1062, QPO1067, QPO1068, QPO1070, QPO1071, QPO1075, QPO1079, QPO1082, QPO1083, QPO1088, QPO1091, QPO1095, QPO1096, QPO1101, QPO1103, QPO1104, QPO1105, QPO1107, QPO1116, QPO1118, QPO1119, QPO1126, QPO1130, QPO1131, QPO1134, QPO1135, QPO1137, QPO1141, QPO1145, QPO1147, QPO1154, QPO1155, QPO1157, QPO1160, QPO1161, QPO1162, XPO00001030, XPO00001035, XPO00001042, XPO00001043, XPO00001044, XPO00001046, XPO00001047, XPO00001052, XPO00001055, XPO00001063, XPO00001064, XPO00001065, XPO00001071
	2103-46	POC00002050, POC00002058, POC1831, POC1832, POC1835, POC1839, POC1844, POC1849, POC1854, POC1859, POC1863, POC1868, POC1870, POC1878, POC1882, POC1885, POC1888, POC1895, POC1902, POC1907, POC1908, POC1909, POC1913, POC1915, POC1920, POC1921, POC1929, POC1936, POC1960, POC1964, POC1968, POC1975, POC1981, POC1986, POC2001, POC2004, POC2010, POC2013, POC2014, POC2019, POC2021, POC2024, POC2029, POC2031, QPO1014, QPO1015, QPO1025, QPO1026, QPO1028, QPO1029, QPO1032, QPO1033, QPO1042, QPO1047, QPO1050, QPO1052, QPO1072, QPO1074, QPO1081, QPO1084, QPO1085, QPO1089, QPO1092, QPO1097, QPO1108, QPO1111, QPO1114, QPO1115, QPO1124, QPO1136, QPO1142, QPO1146, QPO1148, QPO1153, XPO00001037, XPO00001048, XPO00001049, XPO00001056, XPO00001057, XPO00001069, XPO00001078, XPO1005, XPO1006, XPO1010, XPO1012, XPO1014



Медицинско средство	Каталожки број	Лот број
	2103-56	POC00002054, POC1836, POC1837, POC1842, POC1855, POC1865, POC1867, POC1876, POC1881, POC1889, POC1892, POC1898, POC1910, POC1914, POC1922, POC1923, POC1949, POC1951, POC1954, POC1955, POC1959, POC1969, POC1989, POC1993, POC1996, POC1997, POC1999, POC2007, POC2008, POC2009, POC2016, POC2025, POC2030, POC2035, POC2038, QPO00001185, QPO1013, QPO1019, QPO1021, QPO1037, QPO1038, QPO1041, QPO1051, QPO1056, QPO1059, QPO1063, QPO1073, QPO1080, QPO1086, QPO1087, QPO1093, QPO1094, QPO1098, QPO1102, QPO1106, QPO1109, QPO1110, QPO1117, QPO1120, QPO1122, QPO1125, QPO1129, QPO1143, QPO1149, QPO1150, XPO00001032, XPO00001039, XPO00001040, XPO00001041, XPO00001050, XPO00001074, XPO00001075, XPO00001076, XPO1015, XPO1016
Pruitt Катетер за Иригација и оклузија	2102-09	PIO1452, PIO1453, PIO1456, PIO1459, PIO1460, PIO1461, PIO1465, PIO1466, PIO1469, PIO1470, PIO1473, PIO1474, PIO1475, PIO1476, PIO1477, PIO1478, PIO1479, QPI1002, QPI1003, QPI1004, QPI1005, QPI1007, QPI1008, QPI1009, QPI1010, QPI1011, QPI1017, QPI1019, QPI1020, QPI1021, QPI1022, QPI1023, QPI1024, QPI1026, QPI1033, QPI1034, QPI1035, QPI1036, QPI1039, QPI1041, QPI1043, QPI1044, QPI1046, QPI1047, QPI1048, QPI1051, QPI1052, QPI1056, QPI1057, QPI1058, QPI1059, QPI1061, QPI1063, XPI000001124, XPI000001120, XPI000001121, XPI000001122, XPI000001124, XPI000001126, XPI000001127, XPI000001128, XPI000001139, XPI000001140, XPI000001143, XPI000001144, XPI000001146, XPI000001147, XPI000001149, XPI000001151, XPI000001152, XPI000001153, XPI1002, XPI1044, XPI1067, XPI1068, XPI1069, XPI1072, XPI1073, XPI1076, XPI1079, XPI1080, XPI1081, XPI1082, XPI1084, XPI1085, XPI1086, XPI1088, XPI1089, XPI1092, XPI1093, XPI1096, XPI1097, XPI1098, XPI1099, XPI1104, XPI1105, XPI1108, XPI1180, XPI1104

