




За пристап во менито на мрежни поставки најпрво притиснете го копчето **Преференции** (Preferences) во долниот ред од дисплејот на тастатура за да се прикаже **мени на преференции** (Preferences Menu).

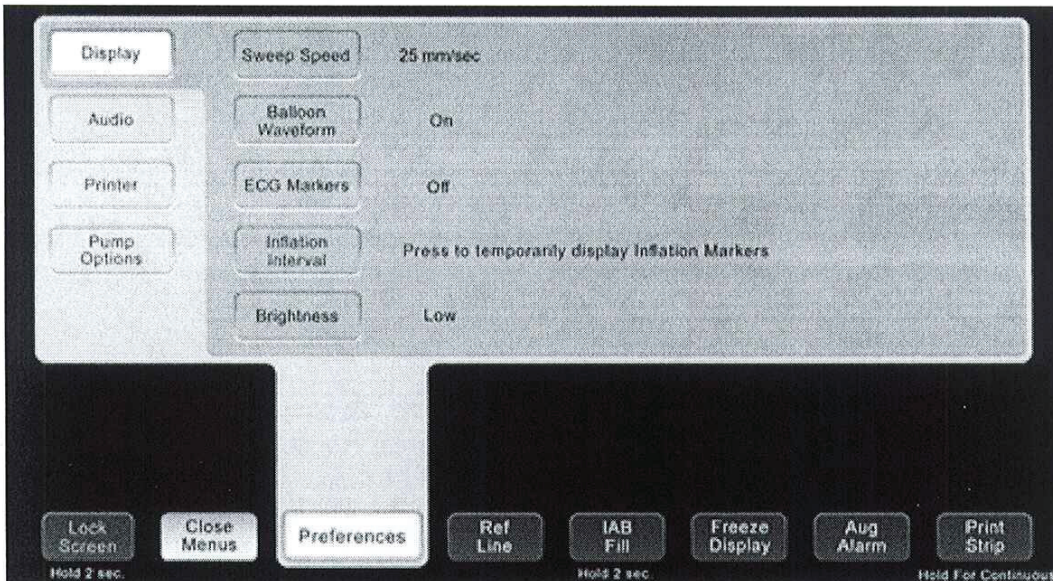

Во **Мени на преференции** изберете го копчето **Опции на пумпата** за да го отворите под-менито **Опции на пумпата**.

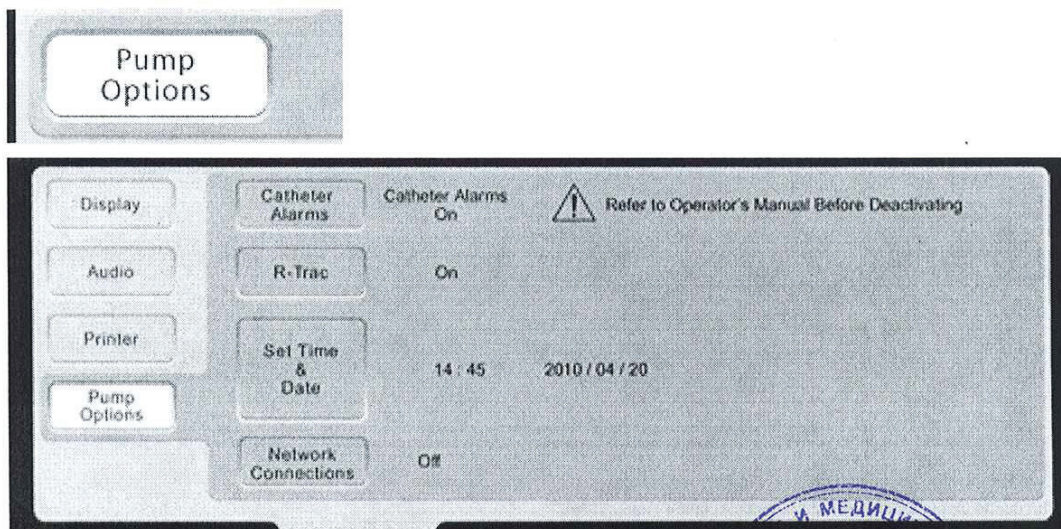

Со отворено мени на **Опции на пумпата** изберете го копчето **Мрежни приклучоци** за да пристапите во мрежни опции.

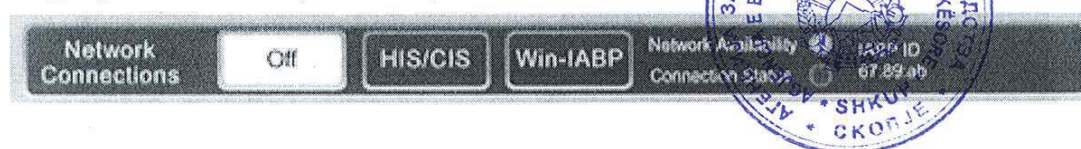

Изберете го копчето „Исклучено“ (Off) и потврдете дека индикаторот Статус на конекции свети црвено.

Connection Status 

Со овие дејствија Cardiosave ќе биде заштитен од потенцијални слабости на надворешна мрежа. Cardiosave не поддржува други типови на мрежна конекција освен директно приклучени кабли за Етернет.

Корективно дејство:

Datascope/Getinge моментално развива софтверска корекција за решавање на проблемот. Претставник на сервисот на Datascope/Getinge ќе Ви се јави за да закаже инсталација на ажуриран софтвер. Оваа работа ќе биде извршена без никаков трошок за Вашата установа.

Пополнете го и потпишете го приложениот образец за одговор (страна 5) од ИТНОТО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ТЕРЕН, КОРЕКЦИЈА НА МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА за да потврдите дека сте го добиле ова известување. Испратете по е-маил скениран примерок од пополнетиот образец на Datascope/Getinge на rserafimoska@alkaloid.com.mk или по факс на +389 2 3204 435.

Се извинуваме за непријатноста која оваа корекција на медицинско средство ја предизвикува. Доколку имате дополнителни прашања, јавете се на Вашиот локален претставник на Datascope/Getinge.

Надлежниот орган во Вашата земја, МАЛМЕД, е известен за оваа постапка.

Одговорно лице за фармаковигиланца и материовигиланца

Невена Станкова Донева
+389 72 211 085
nstankova@alkaloid.com.mk

